





후지 의료기 모바일 앱 사용 가이드

이 앱은 마사지 의자와 연결하여 사용할 수 있습니다.

그때그때의 피로, 컨디션, 헬스케어 정보를 바탕으로 AI가 최적의 마사지를 선택하여 마사지 코스를 제안합니다. 사용법에 익숙해질수록 이상적인 마사지를 받을 수 있습니다.

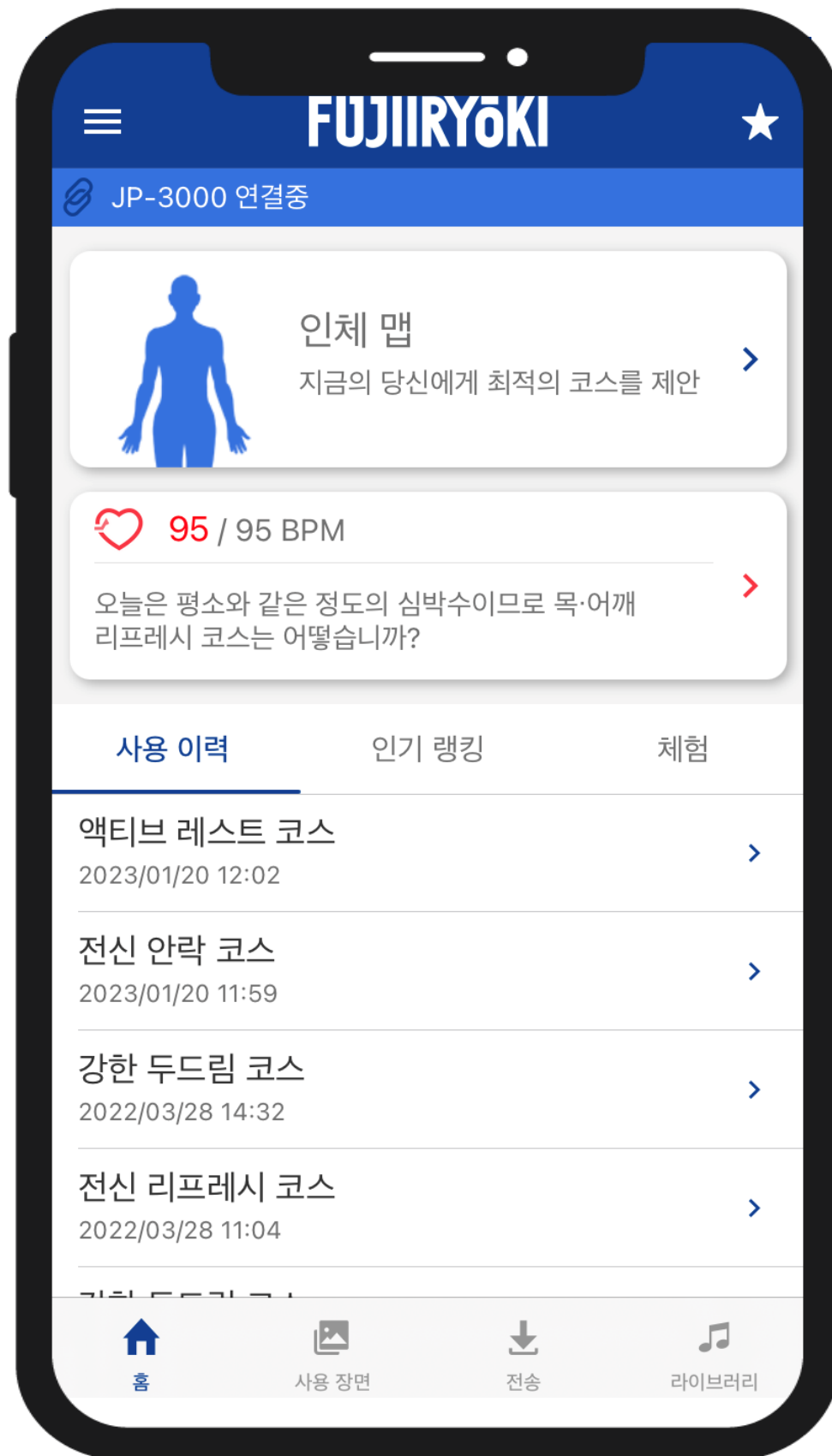

계정만들기

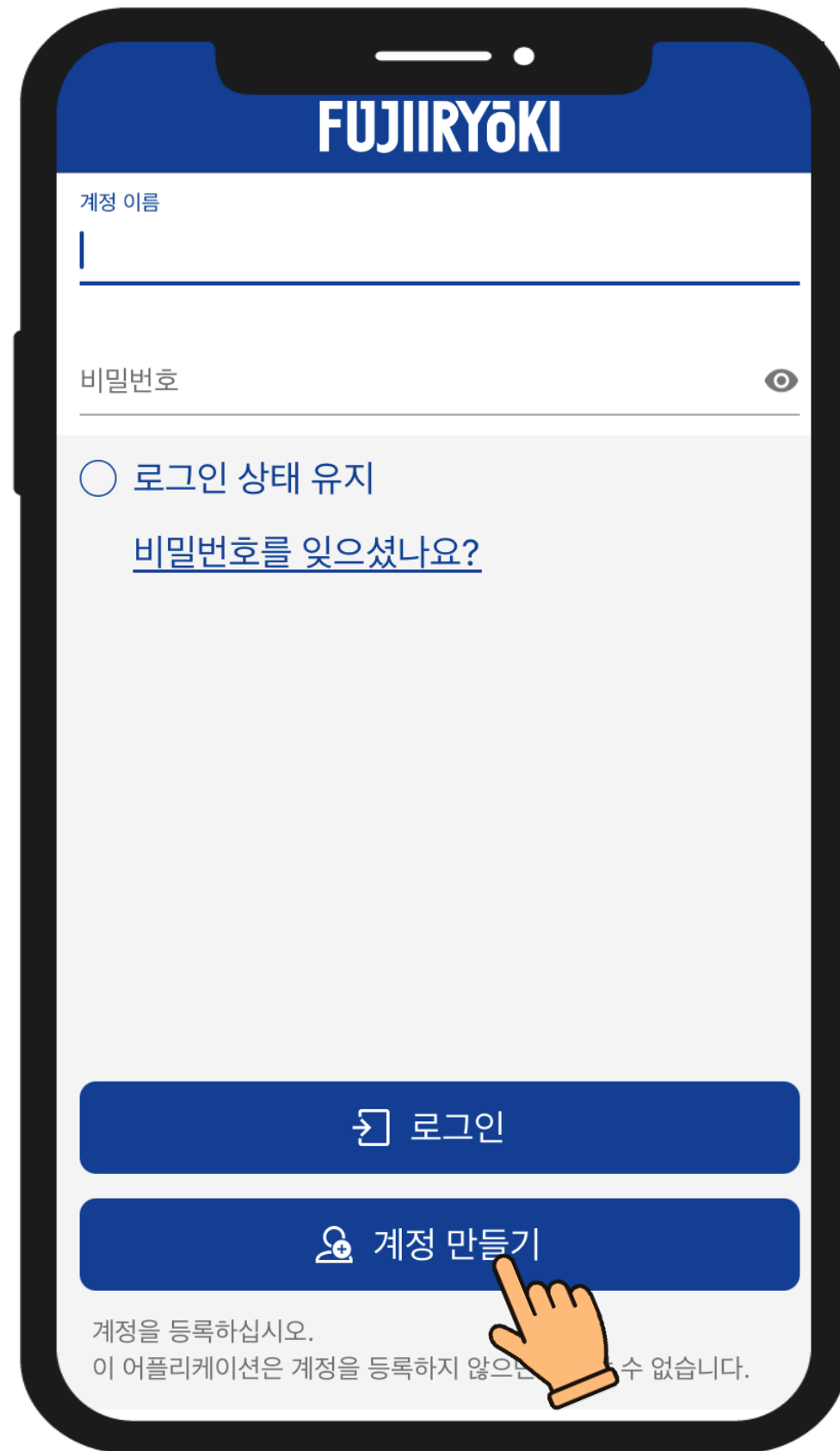


계정만들기

앱을 사용하려면 계정을 만들어야 합니다.

※ 등록된 계정은 본 앱의 이용에만 사용됩니다.

① 앱을 실행하고 계정 만들기를 탭합니다.

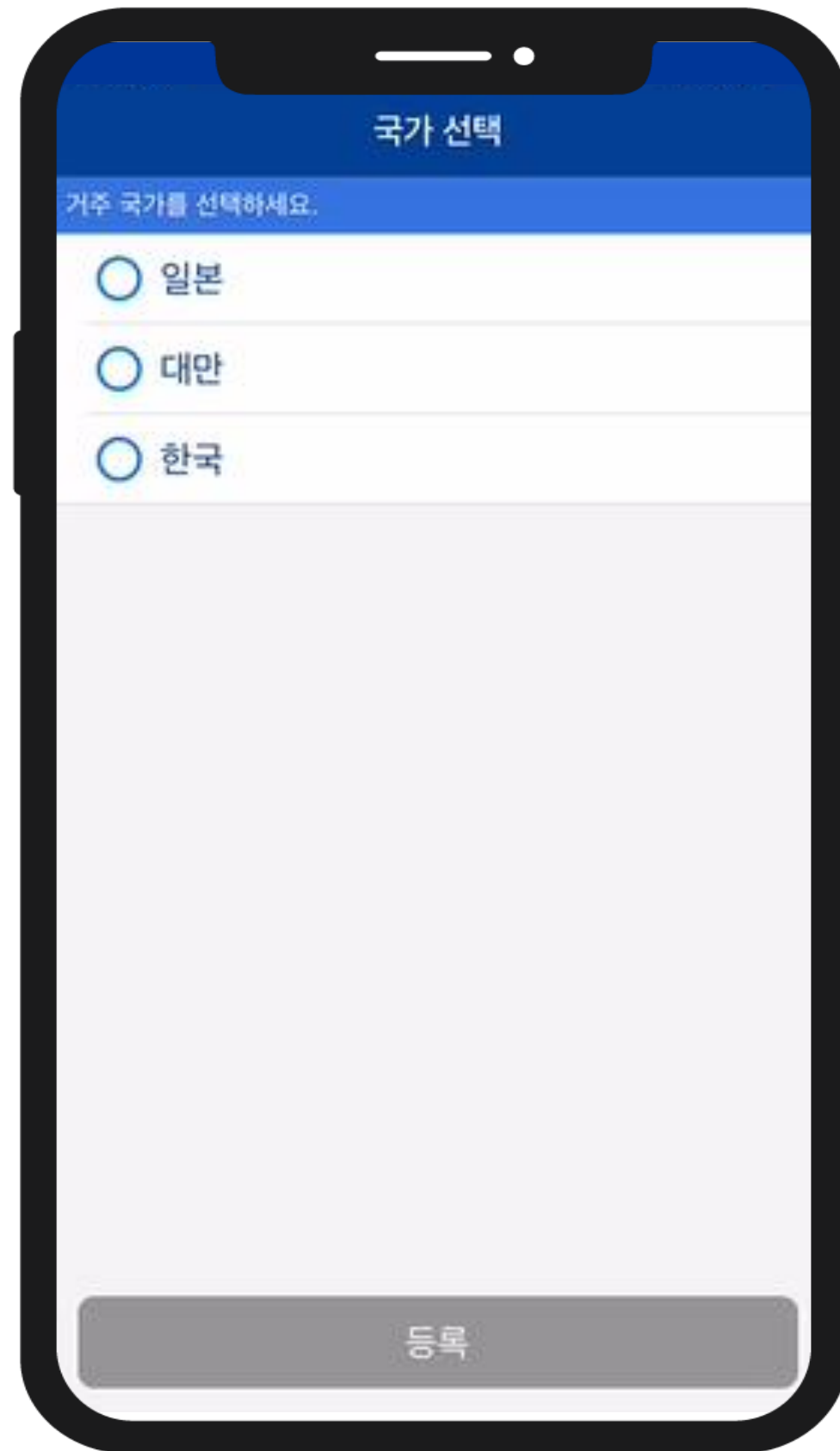

계정만들기

앱을 사용하려면 계정을 만들어야 합니다.

※ 등록된 계정은 본 앱의 이용에만 사용됩니다.

- ① 앱을 실행하고 계정 만들기를 탭합니다.
- ② 본 앱의 이용 약관 등이 표시되므로 자세히 확인하시기 바랍니다.

< 인증 코드 보내기

계정 이름과 인증 코드를 보낼 곳을 입력합니다.

계정 이름
fujikr

☒ 전화번호

국가/지역 선택
+81(일본)

전화번호
8046523751

☐ 이메일 주소

입력한 전화번호나 이메일 주소로
인증 코드가 포함된 메시지를 보냅니다.
메시지 요금 및 데이터 통신 요금이 발생할 수 있습니다.

[인증 코드가 도착하지 않는 경우](#)


전송

계정만들기

앱을 사용하려면 계정을 만들어야 합니다.

※ 등록된 계정은 본 앱의 이용에만 사용됩니다.

- ① 앱을 실행하고 계정 만들기를 탭합니다.
- ② 본 앱의 이용 약관 등이 표시되므로 자세히 확인하시기 바랍니다.
- ③ 등록할 사용자 정보를 입력합니다.
- ④ 입력 후, 「전송」을 탭하면 입력하신 내용을 바탕으로 이메일 또는 문자 메시지가 전송됩니다.

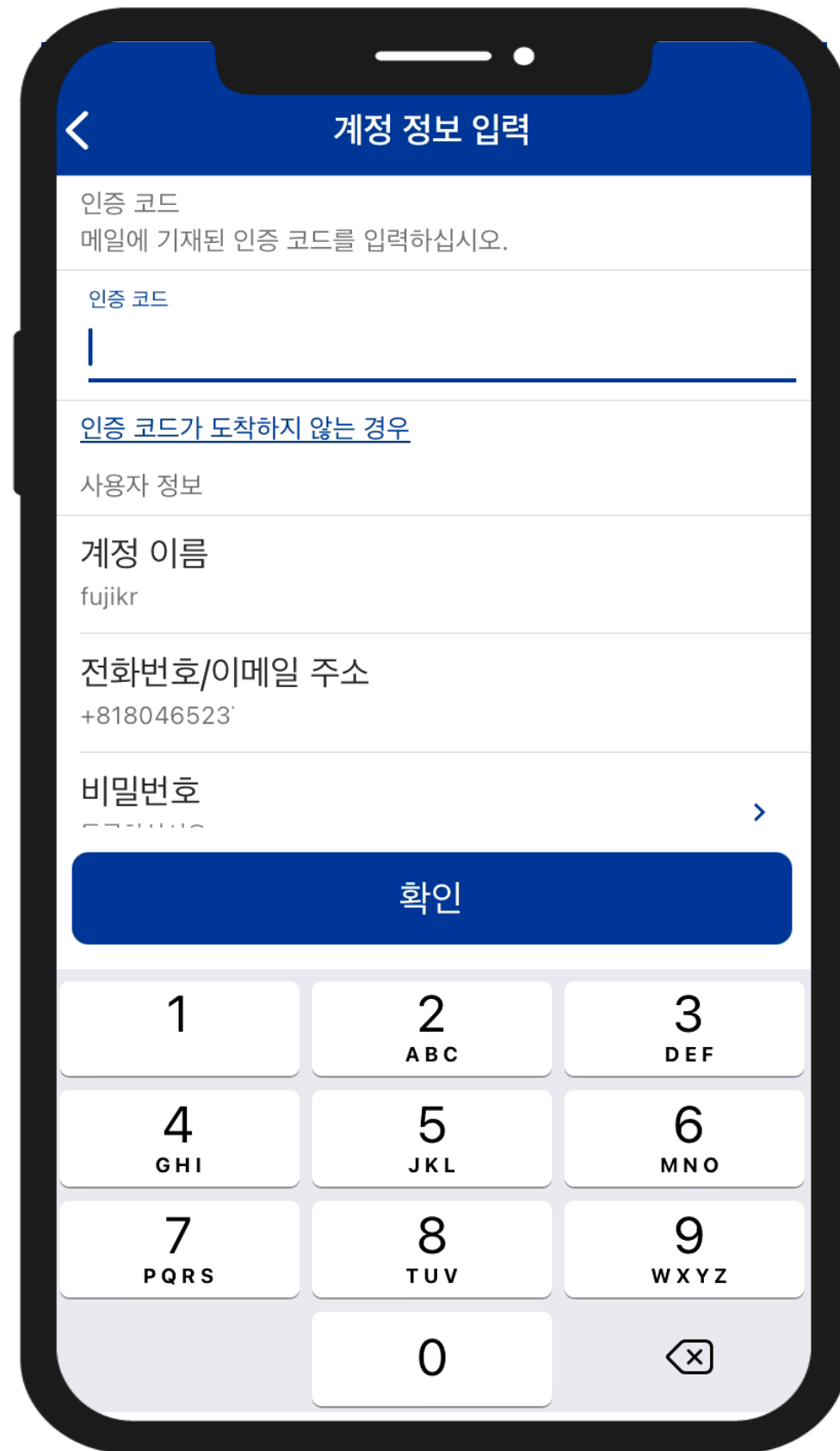

The image shows a smartphone screen with a blue header bar containing a back arrow and the text '계정 정보 입력'. Below the header, there are several input fields: '인증 코드' (Verification Code) with a hint '메일에 기재된 인증 코드를 입력하십시오.', a text input field for the code, a link '인증 코드가 도착하지 않는 경우', '사용자 정보' (User Information) section with '계정 이름' (Account Name) containing 'fujikr', '전화번호/이메일 주소' (Phone Number/Email Address) containing '+818046523', and a '비밀번호' (Password) field with a toggle icon. A blue '확인' (Confirm) button is below the password field. At the bottom is a numeric keypad with letters on the number keys and a backspace key.

계정만들기

앱을 사용하려면 계정을 만들어야 합니다.

※ 등록된 계정은 본 앱의 이용에만 사용됩니다.

- ① 앱을 실행하고 계정 만들기를 탭합니다.
- ② 본 앱의 이용 약관 등이 표시되므로 자세히 확인하시기 바랍니다.
- ③ 등록할 사용자 정보를 입력합니다.
- ④ 입력 후, 「전송」을 탭하면 입력하신 내용을 바탕으로 이메일 또는 문자 메시지가 전송됩니다.
- ⑤ 전송된 인증 번호를 입력한 후 성별 등 사용자 정보를 입력해 주십시오. 입력이 완료되면, 「확인」을 탭하십시오.
- ⑥ 입력하신 내용을 확인하시고 「등록」을 탭하면 계정 생성이 완료됩니다.

블루투스 연결

블루투스로 스마트폰과 안마의자를 페어링합니다.

블루투스 설정에서 안마의자와 페어링합니다. 페어링이 완료되면 리모컨 화면의 블루투스 아이콘이 파란색으로 바뀝니다.




- ① 리모컨으로 안마의자의 전원을 켜면 페어링이 가능한 상태가 됩니다.
- ② 스마트폰의 메인 화면에서 설정 > 블루투스로 이동합니다.



블루투스® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며, FUJIIRYOKI 은(는) 해당 기업의 허가 하에 해당 상표를 사용합니다. 그 외 상표 및 상호는 해당 소유자의 소유입니다.

블루투스로 스마트폰과 안마의자를 페어링합니다.

블루투스 설정에서 안마의자와 페어링합니다. 페어링이 완료되면 리모컨 화면의 블루투스 아이콘이 파란색으로 바뀝니다.

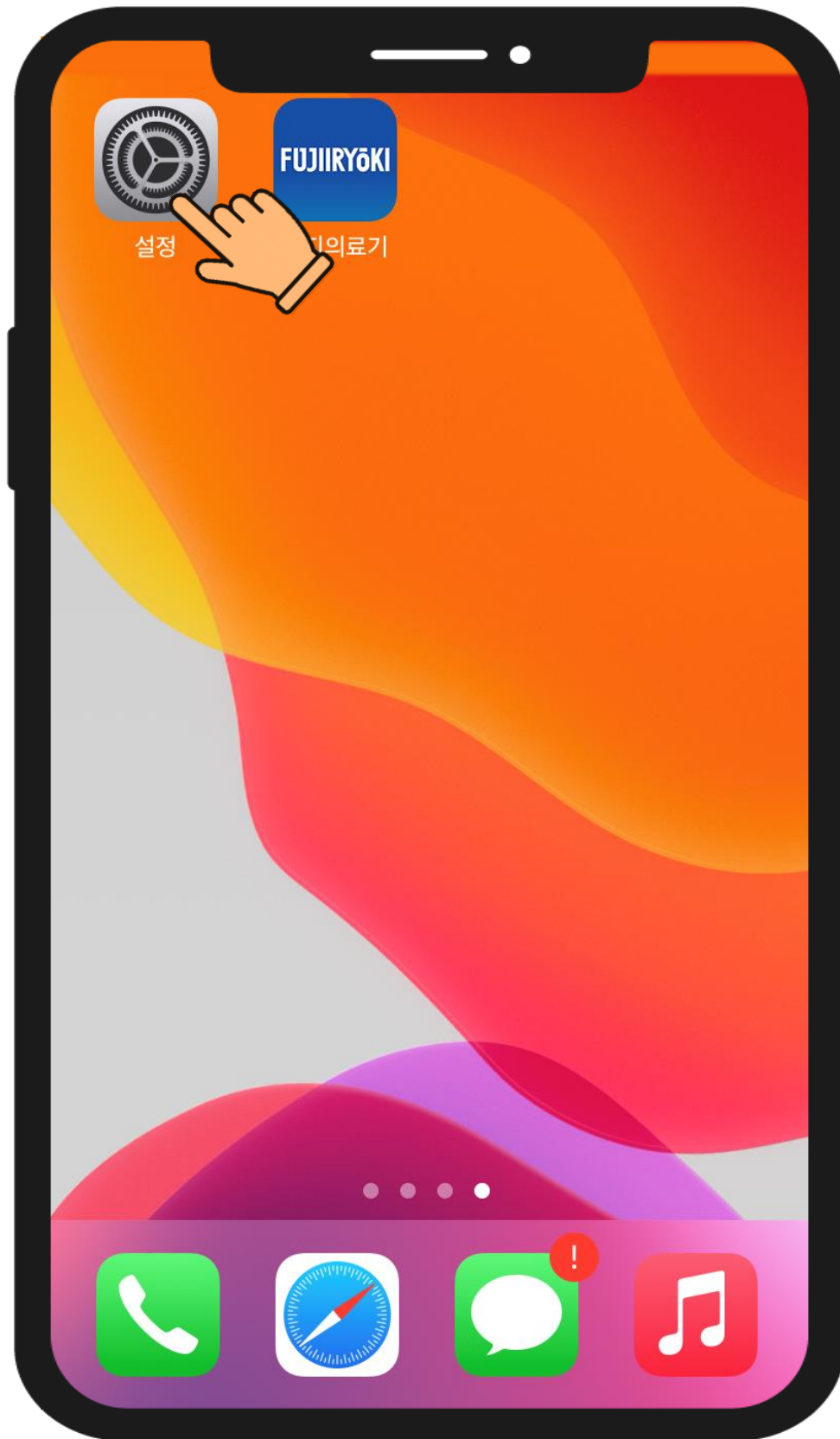


- ① 리모컨으로 안마의자의 전원을 켜면 페어링이 가능한 상태가 됩니다.
- ② 스마트폰의 메인 화면에서 설정 > 블루투스로 이동합니다.
- ③ 기기 목록에 나타나는 안마의자 (**Massage Chair H22**) 를 탭합니다.



블루투스로 스마트폰과 안마의자를 페어링합니다.

블루투스 설정에서 안마의자와 페어링합니다. 페어링이 완료되면 리모컨 화면의 블루투스 아이콘이 파란색으로 바뀝니다.

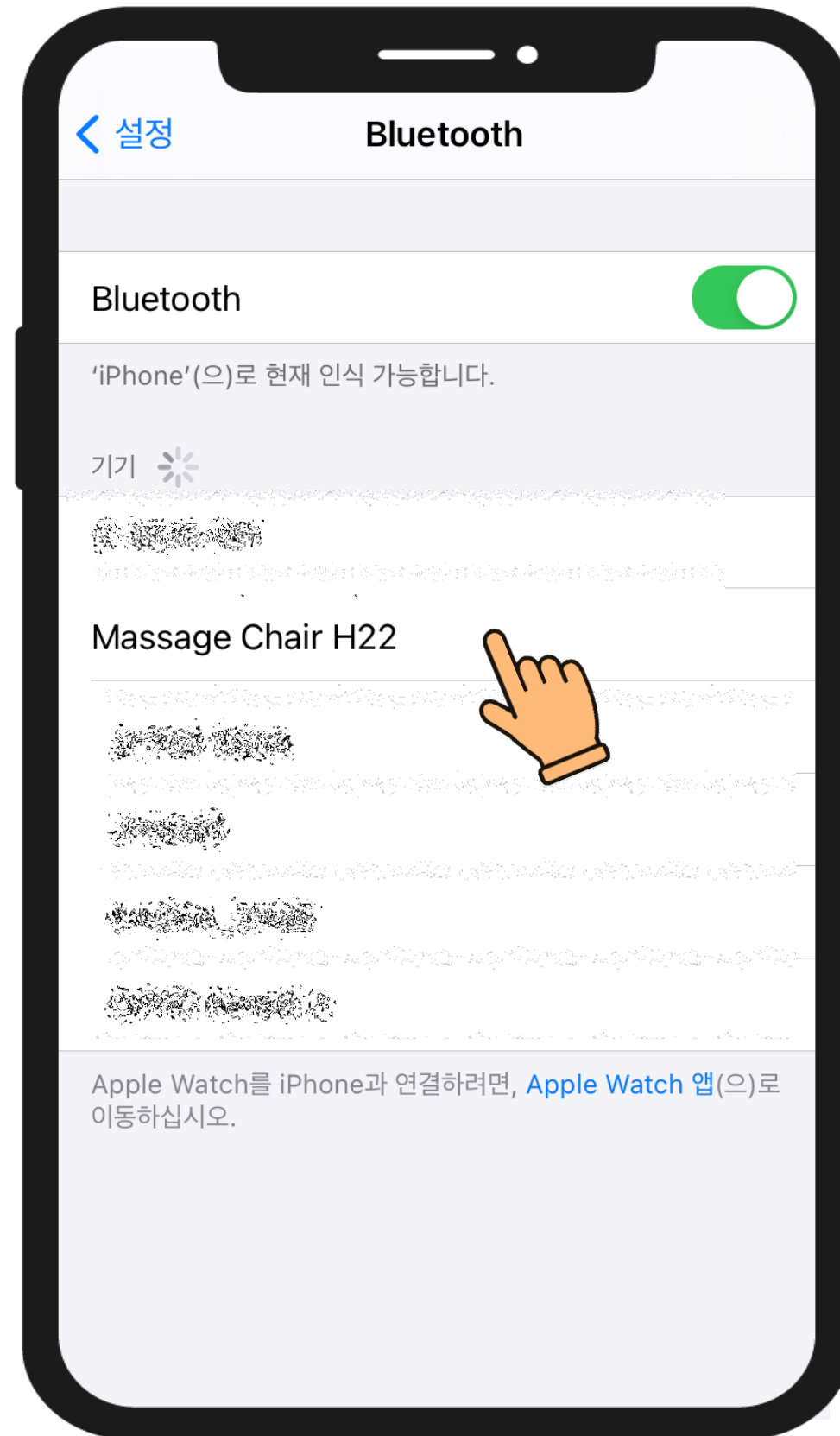


- ① 리모컨으로 안마의자의 전원을 켜면 페어링이 가능한 상태가 됩니다.
- ② 스마트폰의 메인 화면에서 설정 > 블루투스로 이동합니다.
- ③ 기기 목록에 나타나는 안마의자 (**Message Chair H22**) 를 탭합니다.
- ④ 잠시 기다리시면 연결이 완료됩니다.

※ 연결되면 리모컨 화면 하단의  가 파란색으로 표시됩니다.

블루투스로 스마트폰과 안마의자를 페어링합니다.

블루투스 설정에서 안마의자와 페어링합니다. 페어링이 완료되면 리모컨 화면의 블루투스 아이콘이 파란색으로 바뀝니다.

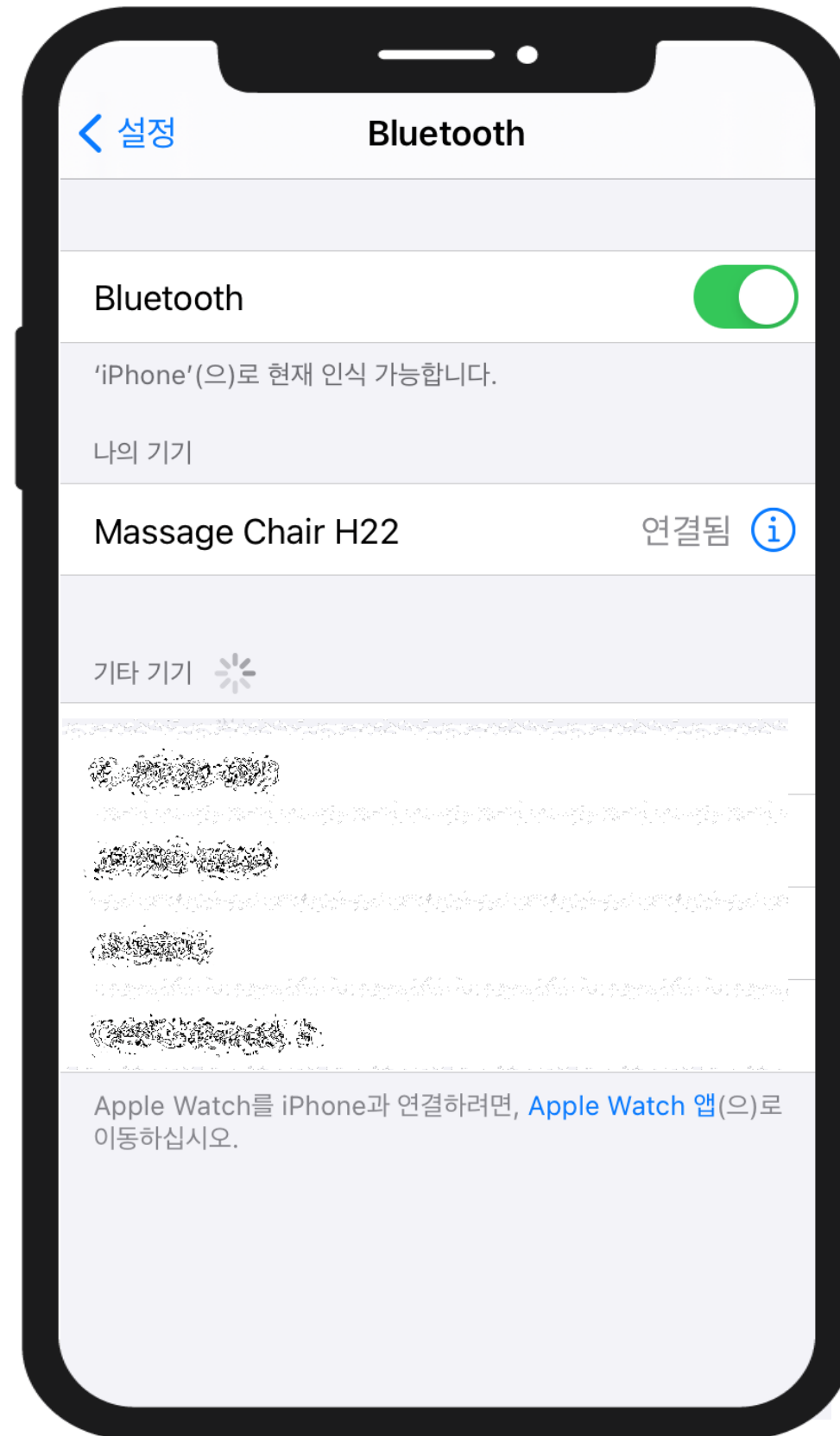

- ① 리모컨으로 안마의자의 전원을 켜면 페어링이 가능한 상태가 됩니다.
- ② 스마트폰의 메인 화면에서 설정 > 블루투스로 이동합니다.
- ③ 기기 목록에 나타나는 안마의자 (**Massage Chair H22**) 를 탭합니다.
- ④ 잠시 기다리시면 연결이 완료됩니다.


※ 연결되면 리모컨 화면 하단의  가 파란색으로 표시됩니다.

안마의자 등록 (초기 등록)

안마의자 등록 ~ 체형 정보 등록


앱과 안마의자를 처음으로 연결하는 경우에는 해당 안마의자의 등록과 안마의자의 체형 검출 기능을 이용한 체형 정보의 등록이 필요합니다.

- ① 안마의자를 켜고 리모컨 화면을 표시합니다.

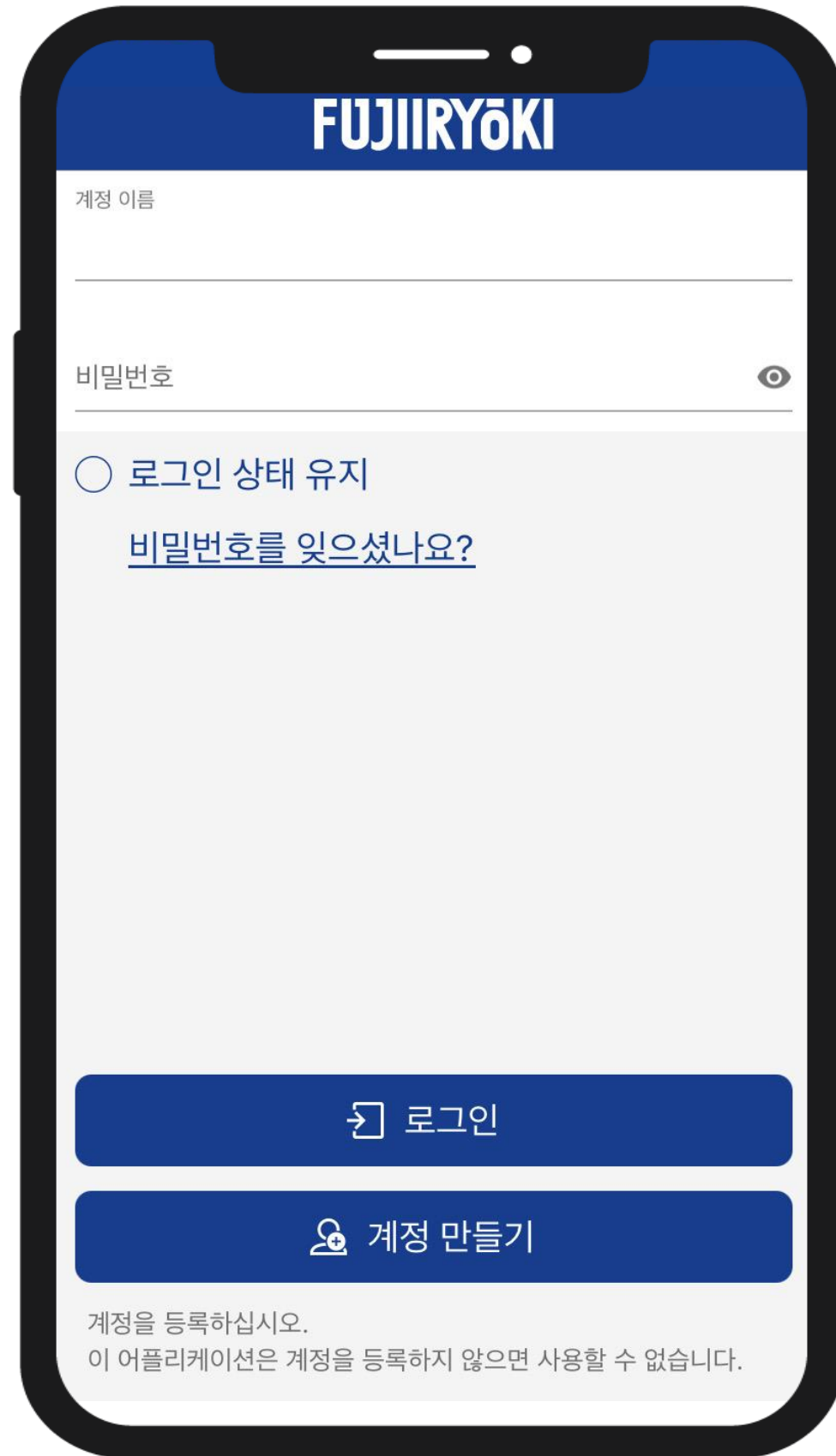

안마의자 등록 ~ 체형 정보 등록


앱과 안마의자를 처음으로 연결하는 경우에는 해당 안마의자의 등록과 안마의자의 체형 검출 기능을 이용한 체형 정보의 등록이 필요합니다.

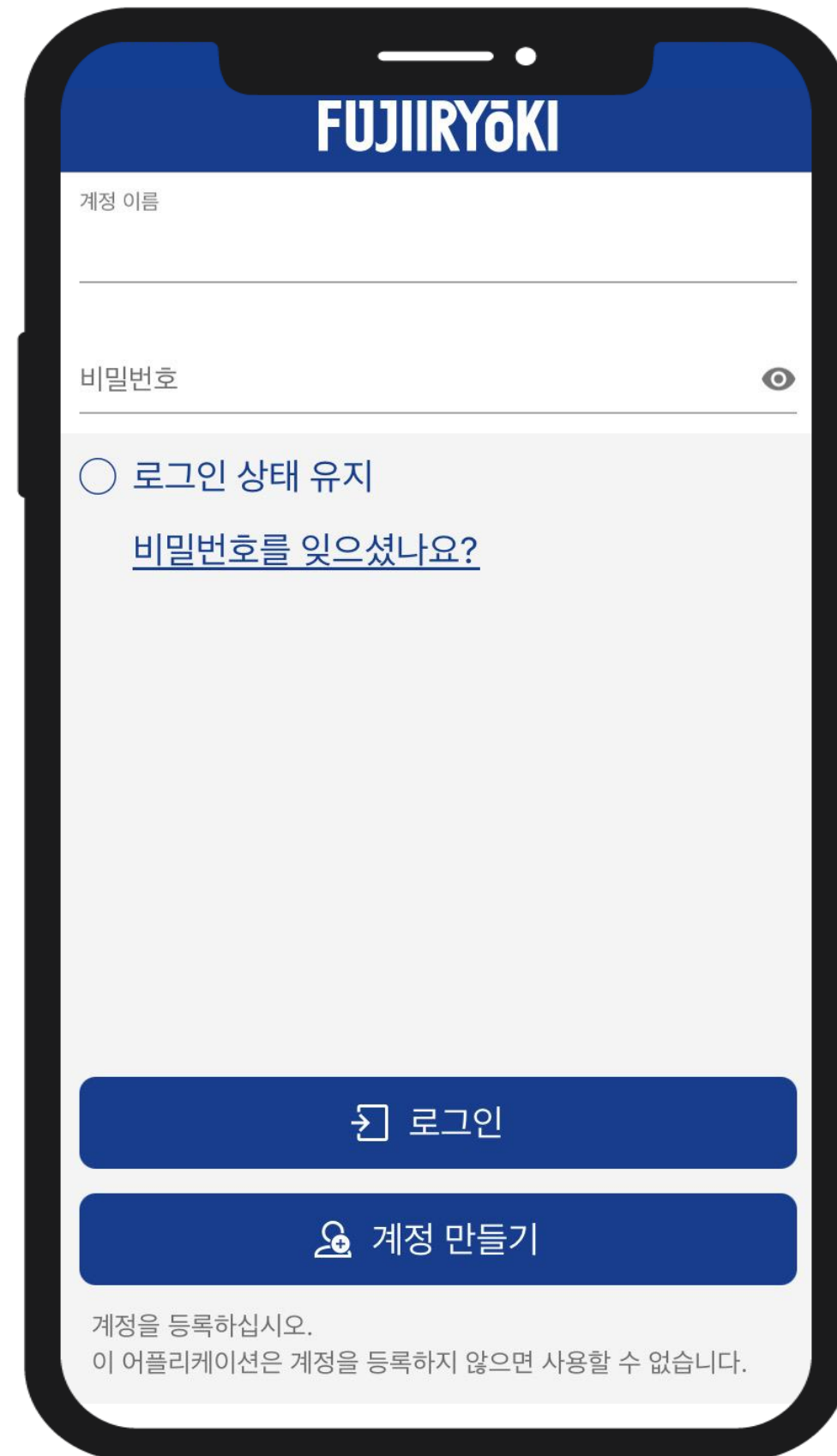

- ① 안마의자를 켜고 리모컨 화면을 표시합니다.
- ② 블루투스 아이콘이 파란색으로 되어 있는지 확인합니다.
- ③ 앱을 실행하고 계정에 로그인합니다.

안마의자 등록 ~ 체형 정보 등록


앱과 안마의자를 처음으로 연결하는 경우에는 해당 안마의자의 등록과 안마의자의 체형 검출 기능을 이용한 체형 정보의 등록이 필요합니다.

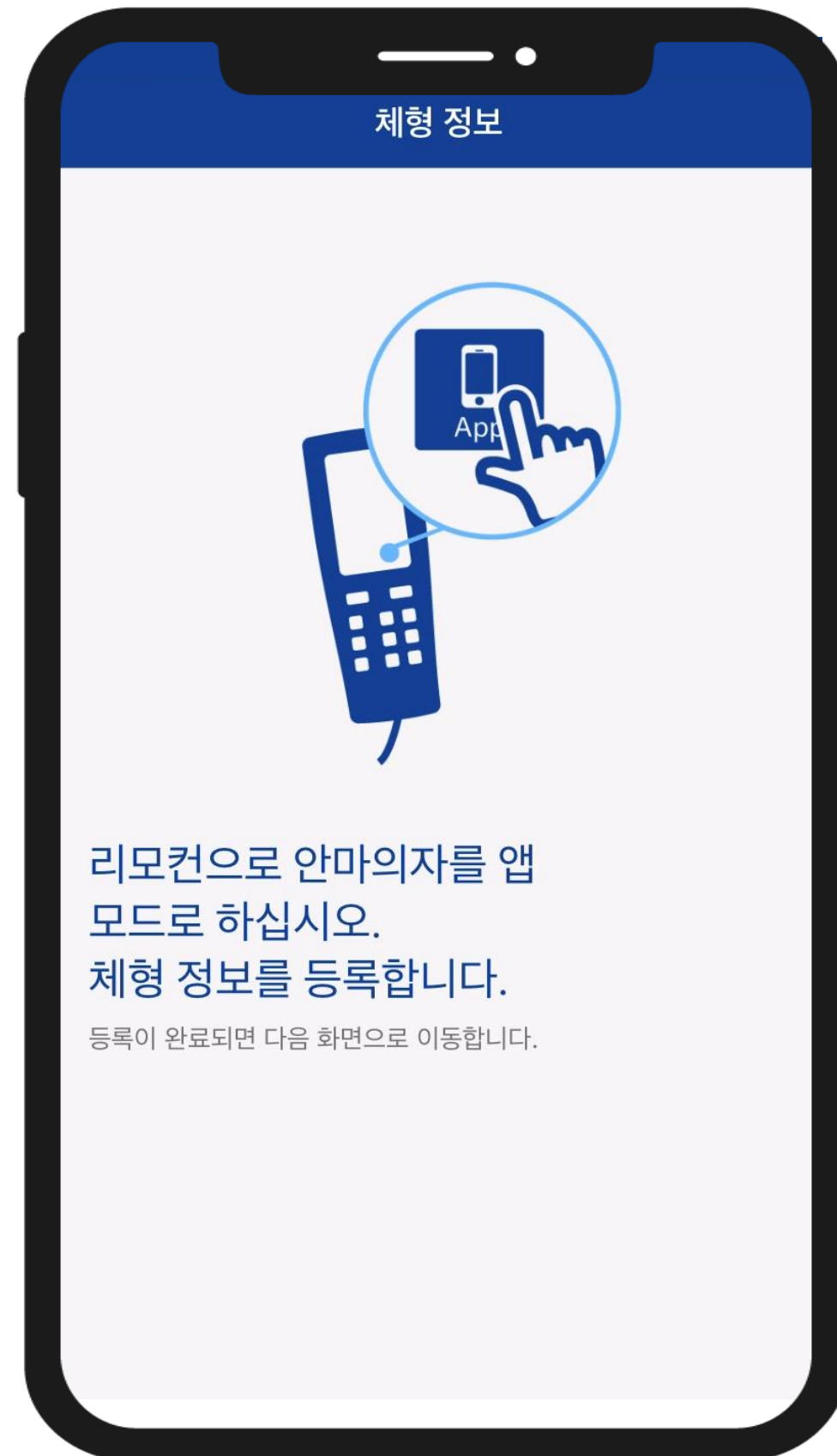

- ④ 연결 가능한 안마의자를 선택합니다.
(JP-3000의 경우「Massage Chair H22」)
- ⑤ 일련 번호를 등록합니다.
- ⑥ 리모컨의 APP 버튼을 누릅니다.

안마의자 등록 ~ 체형 정보 등록

앱과 안마의자를 처음으로 연결하는 경우에는 해당 안마의자의 등록과 안마의자의 체형 검출 기능을 이용한 체형 정보의 등록이 필요합니다.

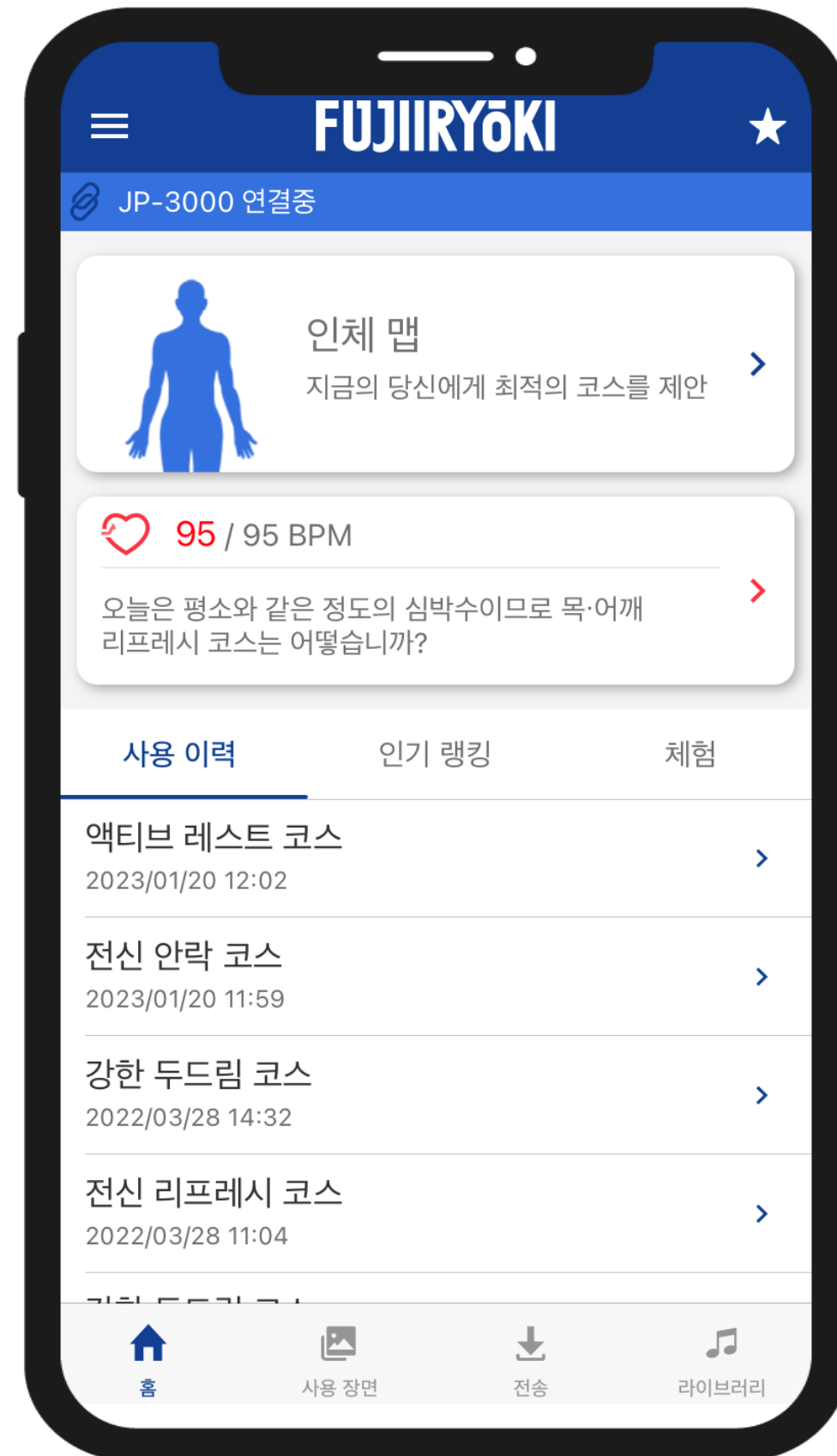

⑦ 안마의자가 체형 정보 감지를 시작합니다.


⑧ 체형 정보 감지가 완료되면 앱이 홈 화면으로 이동합니다.



인체 맵

인체 맵

몸의 피로 부분에 색상을 칠해 몸의 피로도를 분석합니다. 분석 결과에 따라
마사지 강도를 고려하여 마사지 코스를 제안합니다.

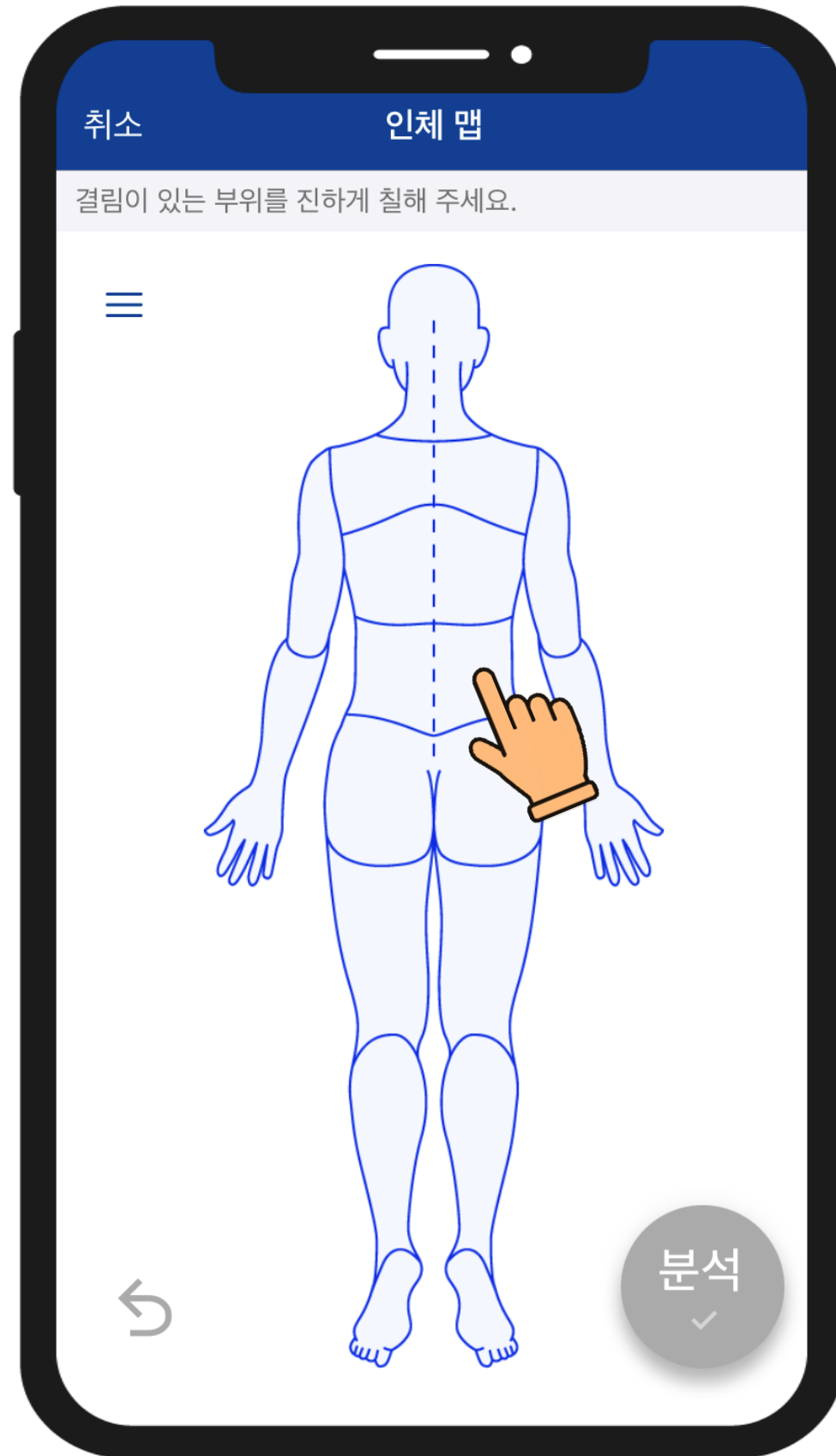


인체 맵

몸의 피로 부분에 색상을 칠해 몸의 피로도를 분석합니다. 분석 결과에 따라 마사지 강도를 고려하여 마사지 코스를 제안합니다.



- ① 신체의 피로한 부위를 손가락으로 눌러 색칠합니다.
- ② 특히 피로한 부위는 반복해서 색칠하면 색이 짙어집니다.
- ③ 각 부위를 피로도에 따라 3단계로 색칠하고「분석」을 탭합니다.

헬스케어

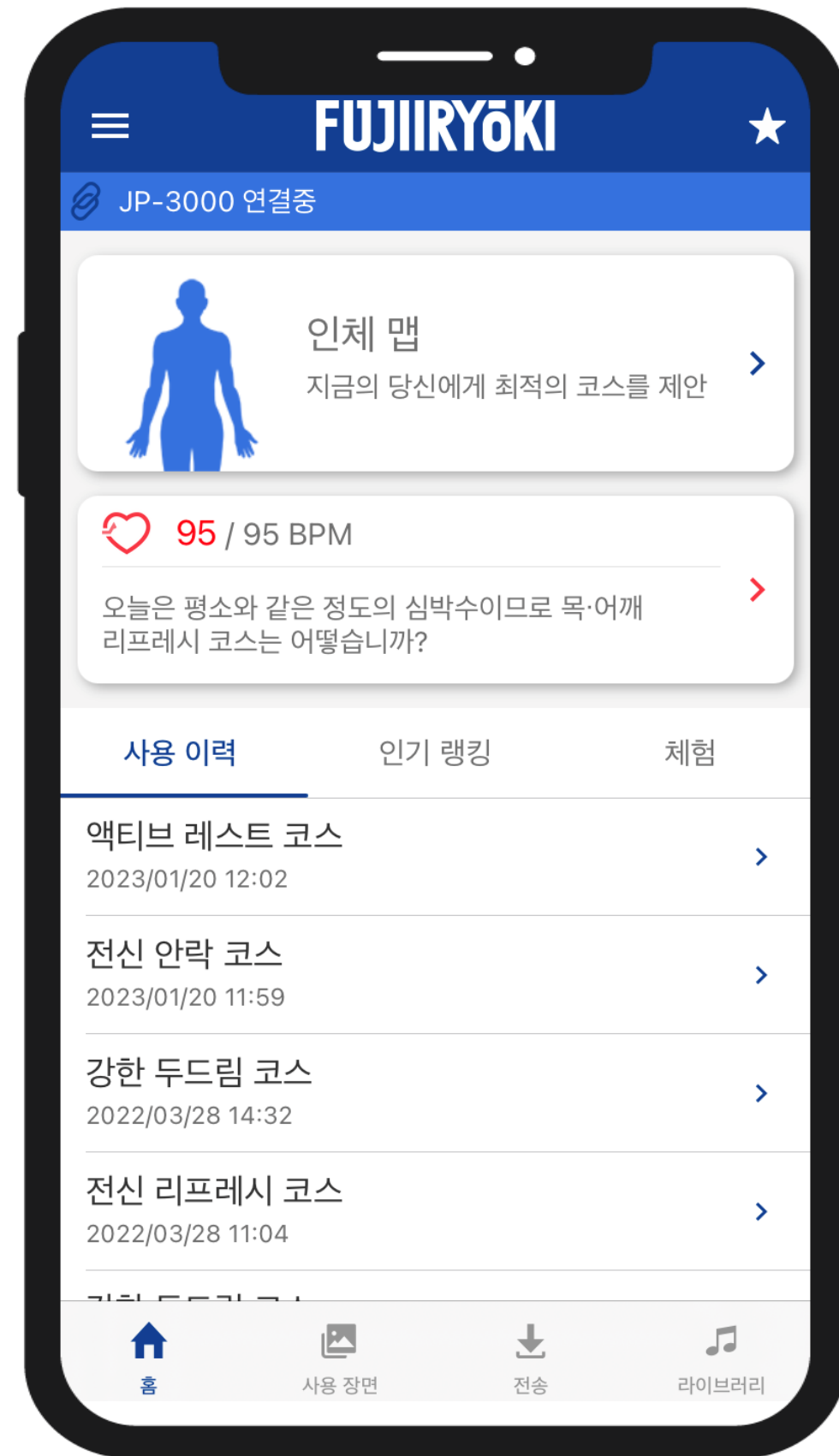

헬스케어 정보를 이용한 어드바이스

헬스케어앱에 접속하여 심장박동수, 걸음수, 수면시간을 참조합니다.
이를 활용해 추천 마사지 코스를 제안합니다.



헬스케어 정보를 이용한 어드바이스

헬스케어앱에 접속하여 심장박동수, 걸음수, 수면시간을 참조합니다.
이를 활용해 추천 마사지 코스를 제안합니다.


시간대에 따라서 다음과 같은 데이터를 이용합니다.

새벽 : 수면 시간

주간 : 심박수


야간 : 걸음수

사용 장면

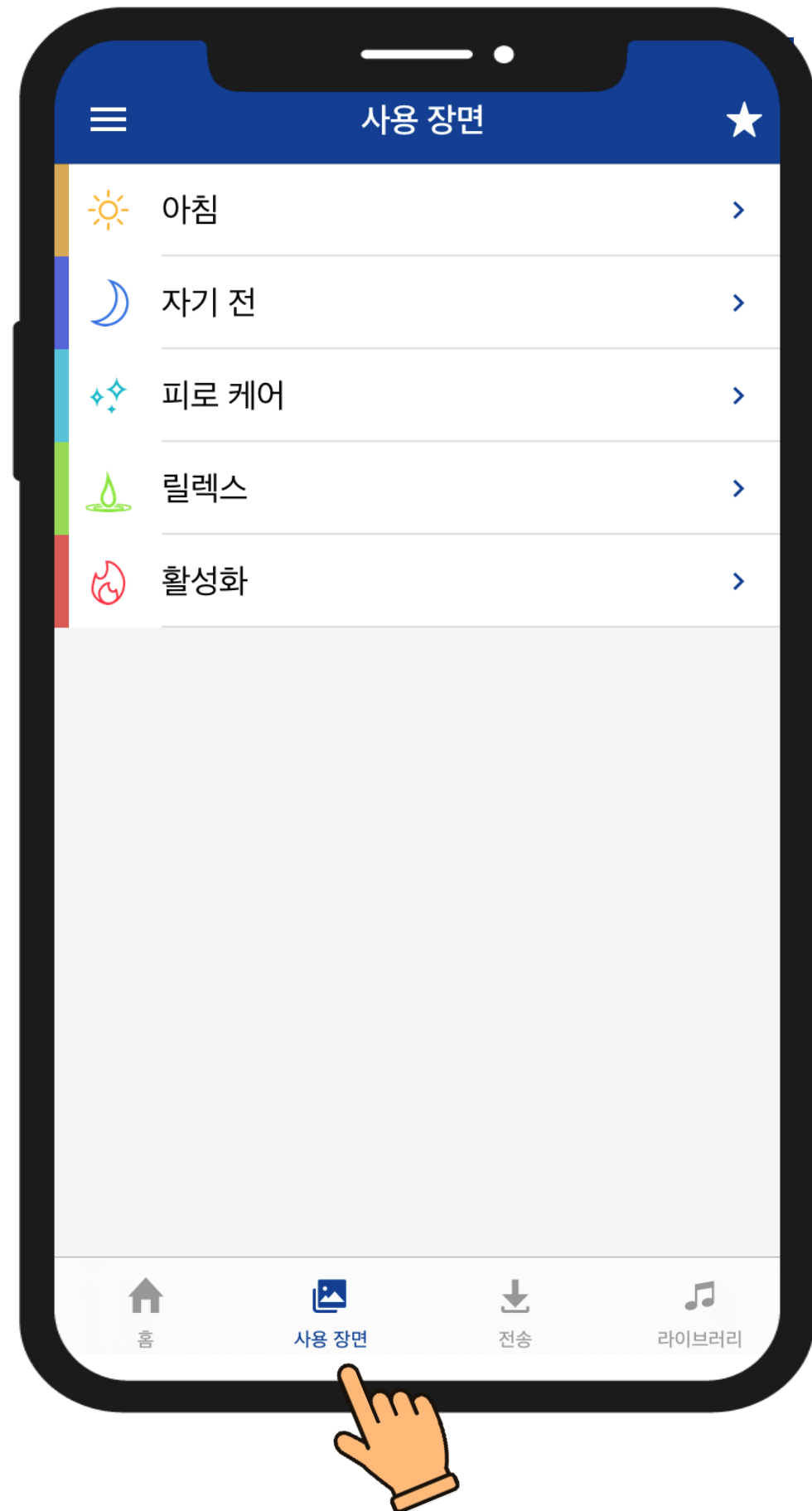

사용 장면에서 마사지 코스를 선택

마사지의 이용 목적을 선택하면 그 목적에 적합한 마사지 코스를 제안합니다.
예를 들어, 아침 「상쾌함을 느끼고 싶다.」를 선택하면 「전신 리프레시 코스」가 제안됩니다.

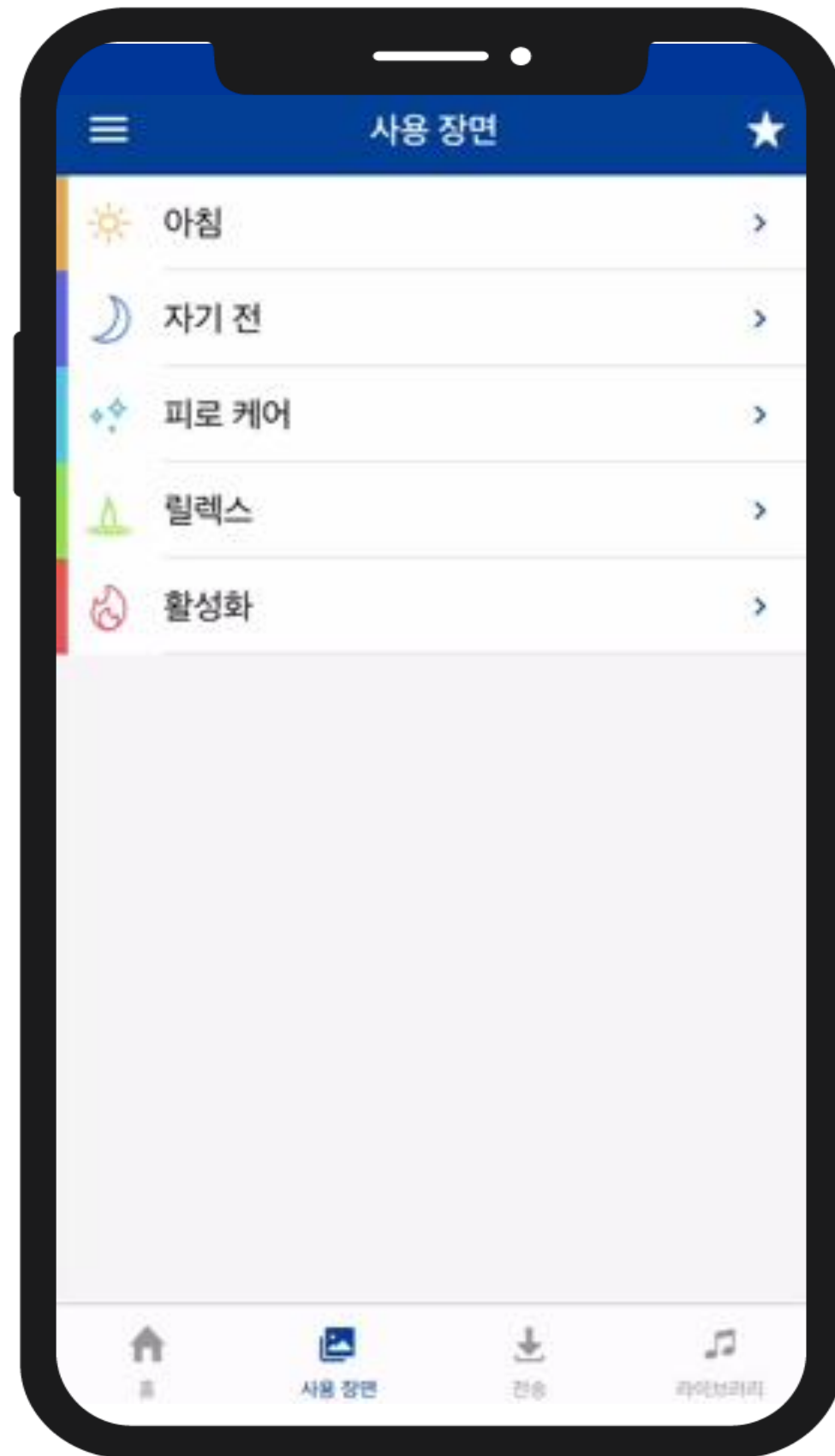


사용 장면에서 마사지 코스를 선택

마사지의 이용 목적을 선택하면 그 목적에 적합한 마사지 코스를 제안합니다.
예를 들어, 아침 「상쾌함을 느끼고 싶다.」를 선택하면 「전신 리프레시 코스」가 제안됩니다.


- ① 사용 장면을 탭합니다.
- ② 이용 목적을 선택합니다.
- ③ 마사지 시작을 탭합니다.

옵션 선택

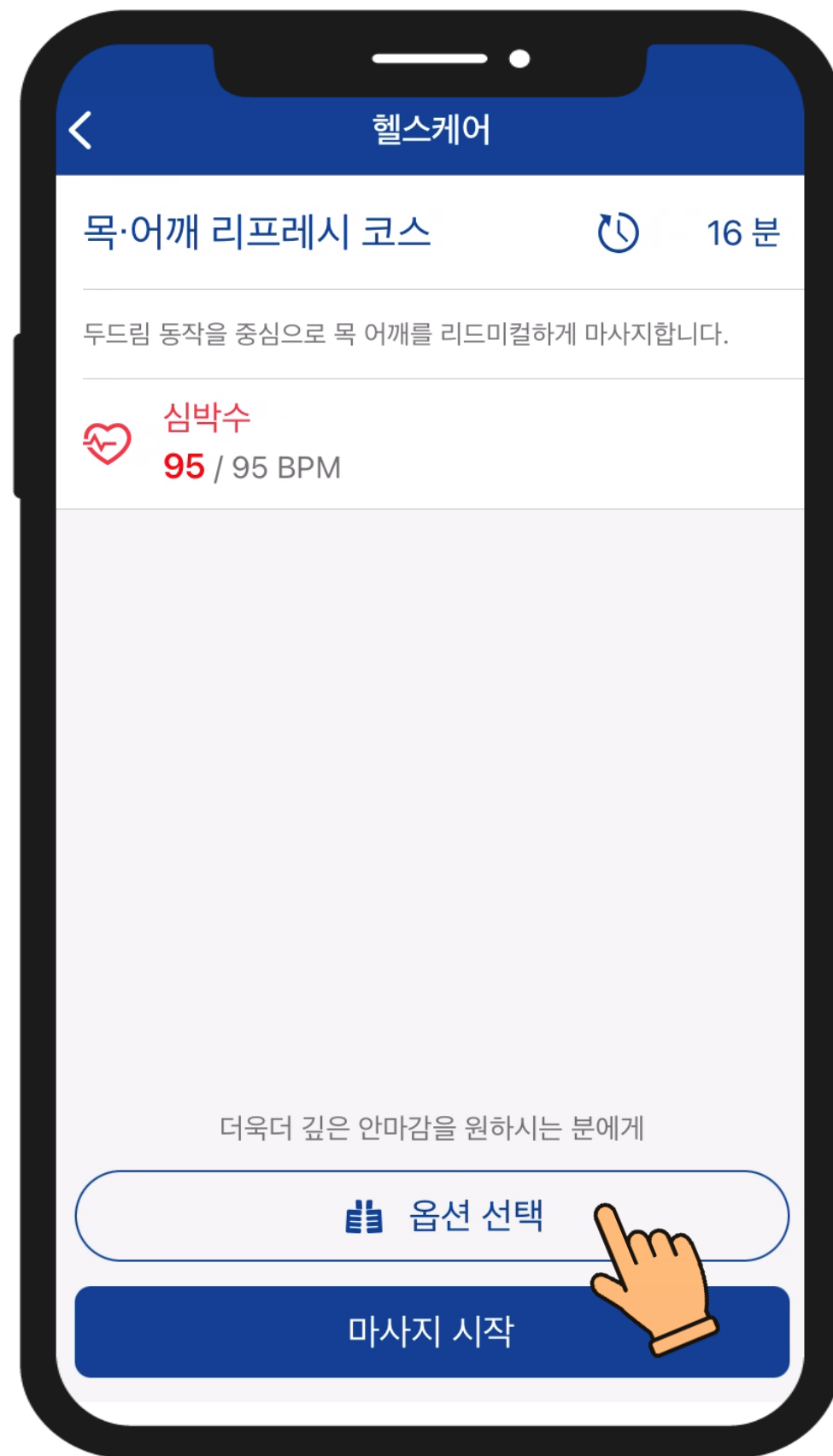

옵션 선택

「강하게」나 「약하게」등 신체 부위별로 마사지의 세기를 조절할 수 있습니다.
사용 이력에도 저장되고, 또한 안마 취향 분석에도 사용됩니다.

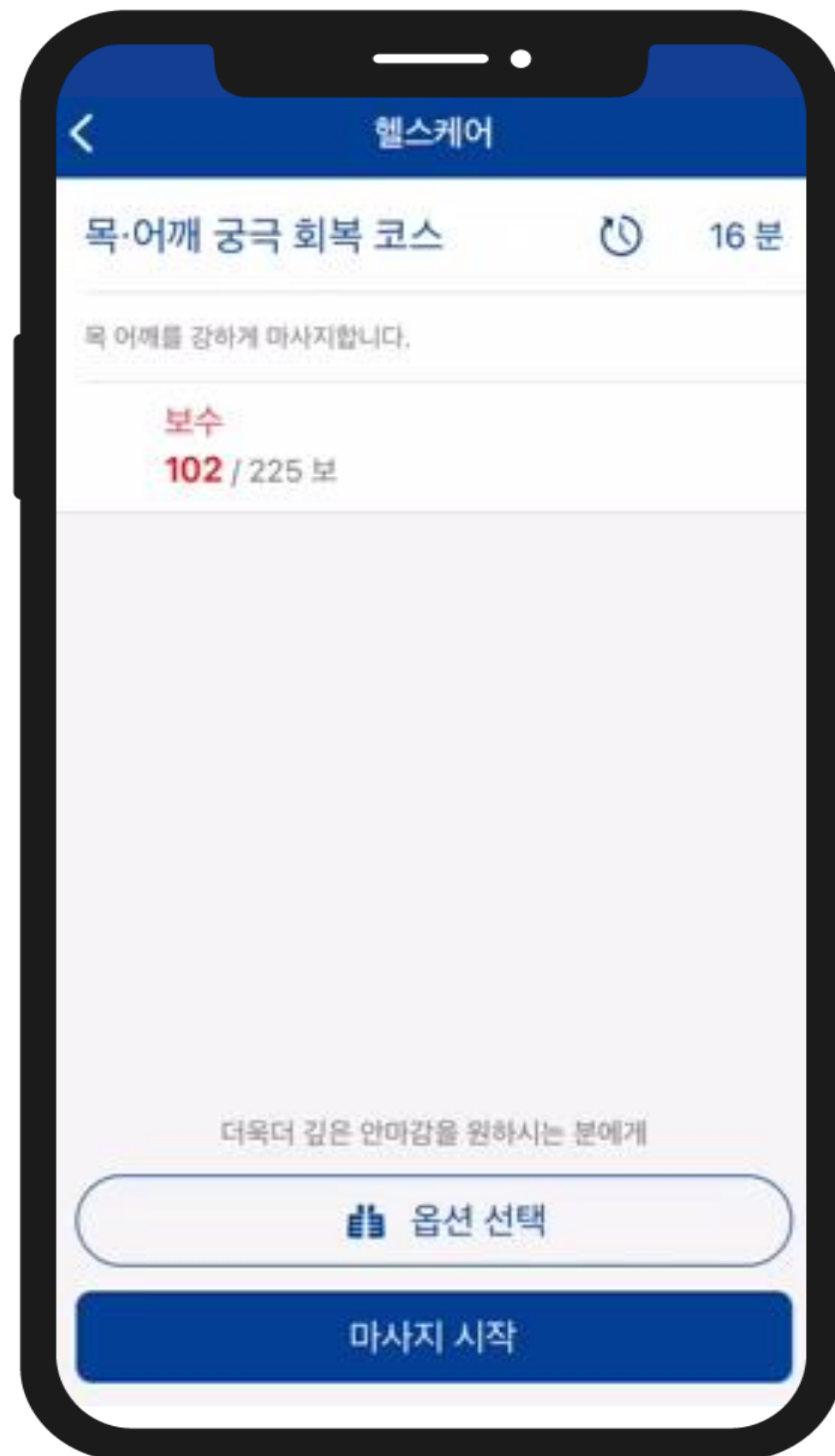


옵션 선택

「강하게」나 「약하게」등 신체 부위별로 마사지의 세기를 조절할 수 있습니다.
사용 이력에도 저장되고, 또한 안마 취향 분석에도 사용됩니다.


- ① 옵션 선택을 탭합니다.
- ② 강하게 또는 약하게 등 세기를 선택합니다.
- ③ 마사지 시작을 탭합니다.

전송 코스

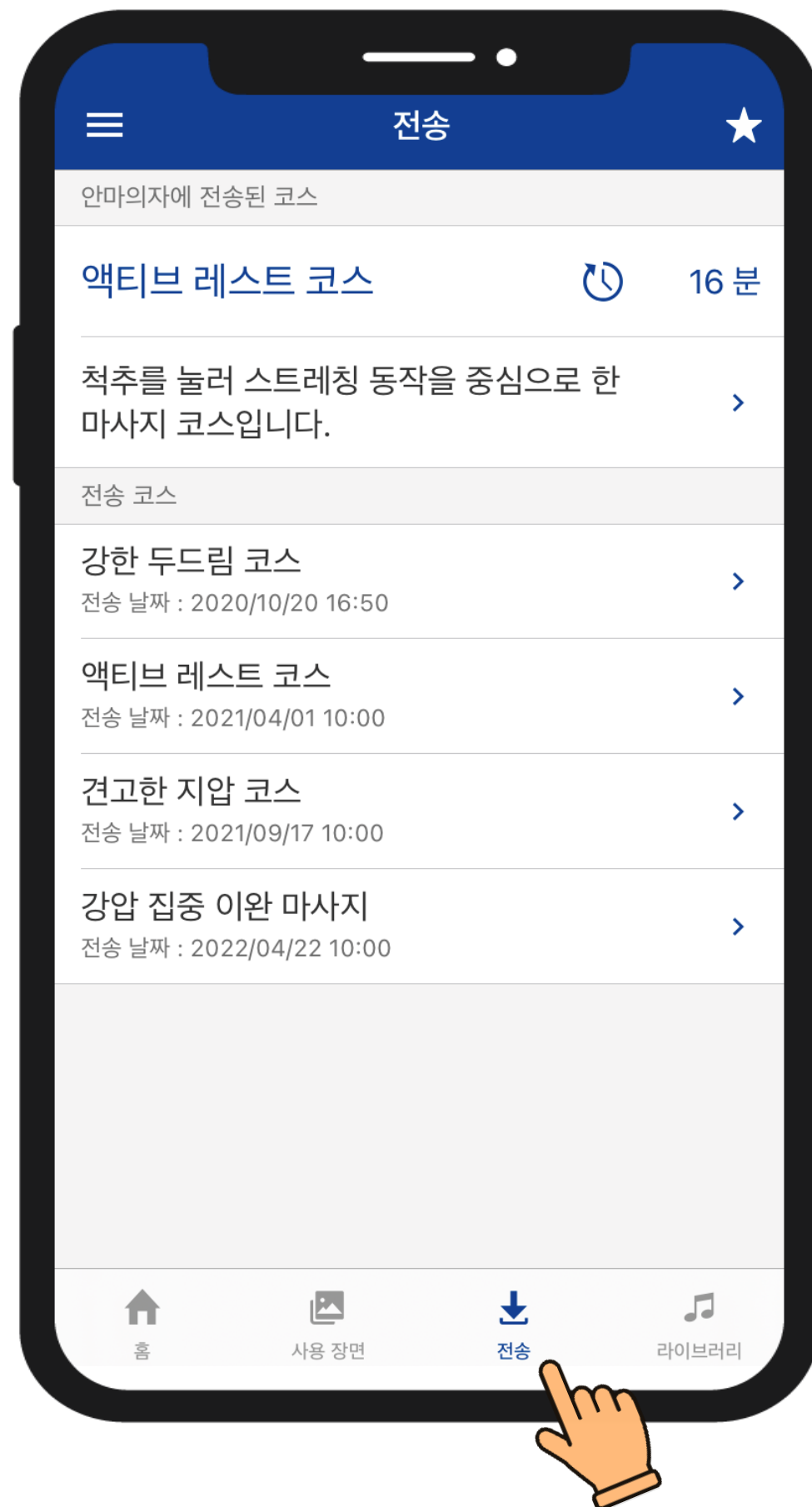

전송 코스


새로운 마사지 코스(전송 코스)를 안마의자에 한개까지 업로드할 수 있습니다.

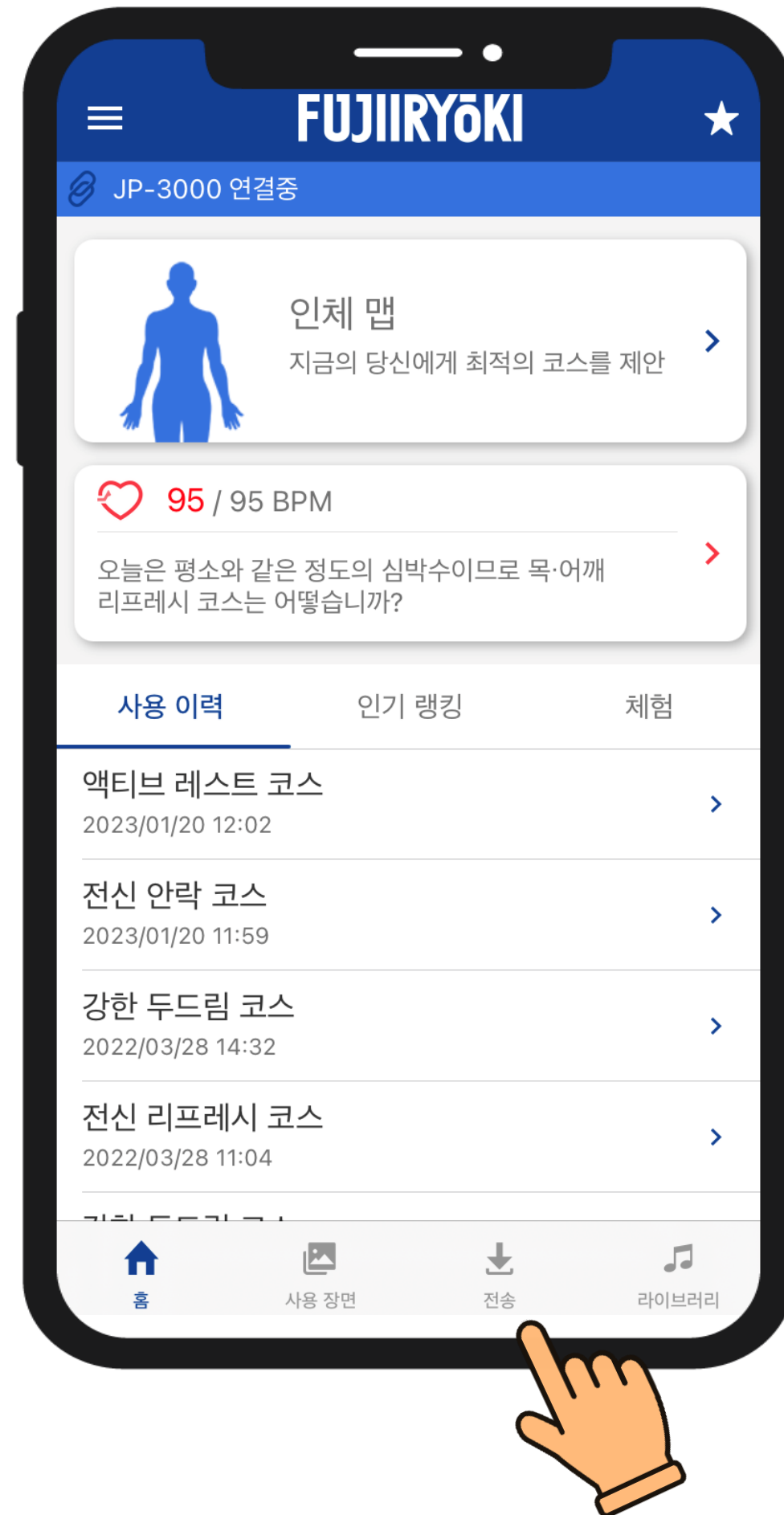

전송 코스


새로운 마사지 코스(전송 코스)를 안마의자에 한개까지 업로드할 수 있습니다.

- ① 전송을 탭합니다.
- ② 마사지 코스를 선택합니다.
- ③ 마사지 시작을 탭한 다음 안마의자에 업로드를 탭합니다.

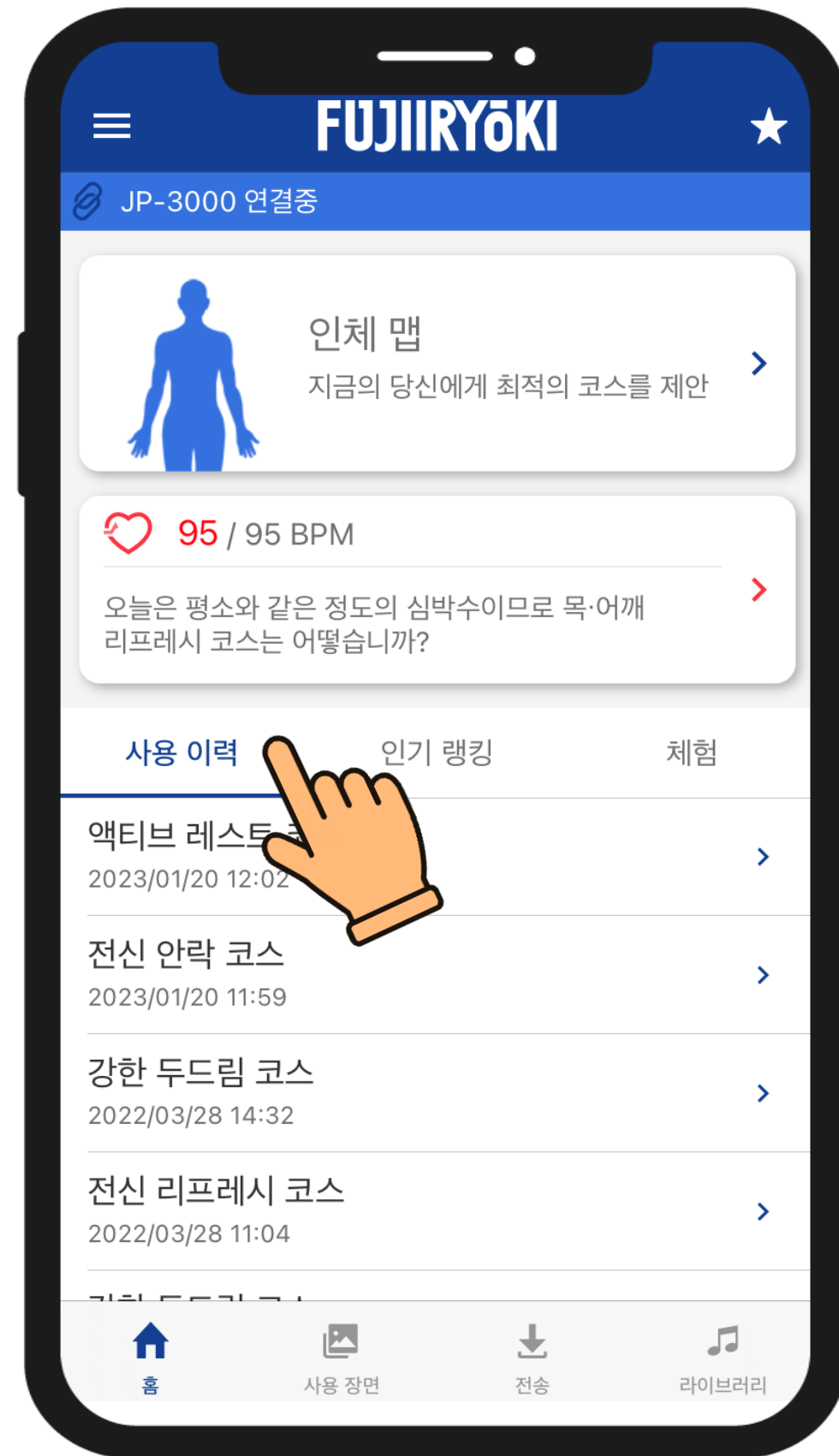

이력


사용 이력이 표시됩니다. 이력 정보에는 「마사지 코스」와 「옵션 선택」의 정보(체형 정보)가 기록되어 있습니다. 과거에 실행한 마사지의 동작・옵션을 완전하게 재현합니다. 또한 이력 정보를 「즐거찾기」에 등록할 수 있으며 언제든지 재현할 수 있습니다.

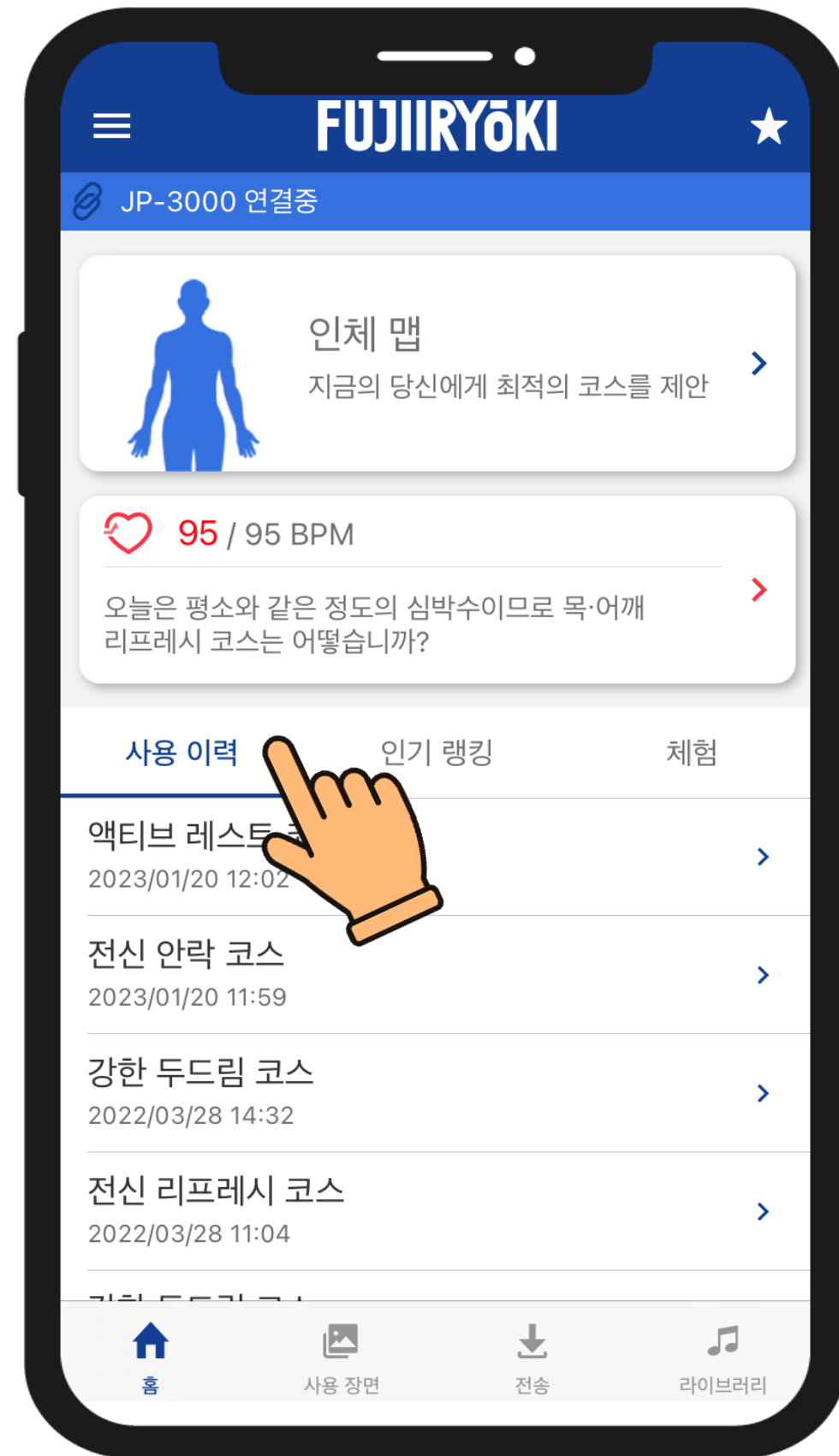

이력


사용 이력이 표시됩니다. 이력 정보에는 「마사지 코스」와 「옵션 선택」의 정보(체형 정보)가 기록되어 있습니다. 과거에 실행한 마사지의 동작 · 옵션을 완전하게 재현합니다. 또한 이력 정보를 「즐거찾기」에 등록할 수 있으며 언제든지 재현할 수 있습니다.

- ① 사용 이력에서 마사지 코스를 선택합니다.
- ② 옵션 선택에서, 강약 등의 취향을 선택할 수 있습니다.
- ③ 마사지를 시작을 탭합니다.

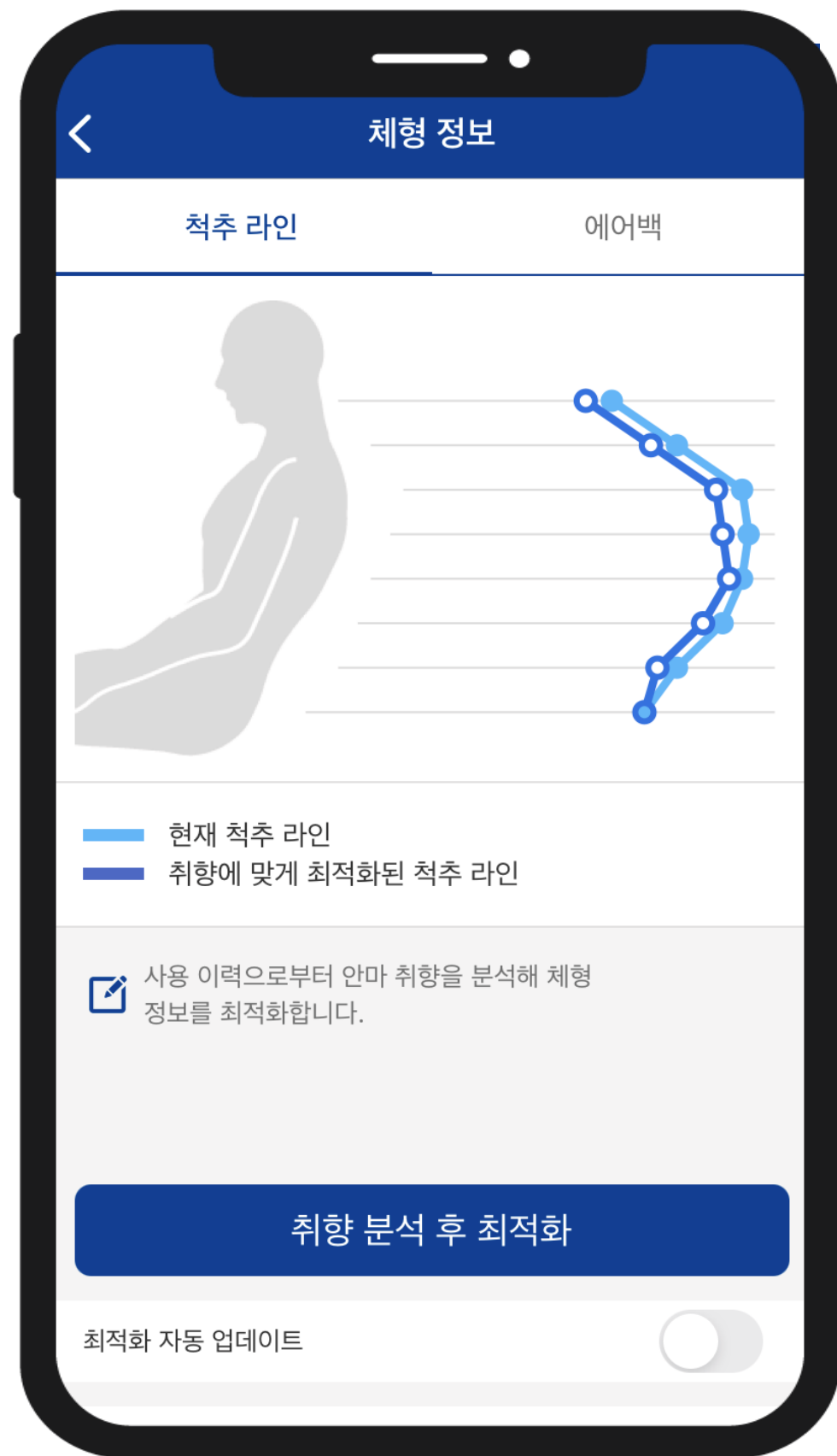

체형 정보 최적화


안마의자 사용 이력으로부터 사용자가 선호하는 마사지의 세기를 분석합니다.
분석 결과를 바탕으로 마사지 실행시에 강도를 자동으로 설정합니다.

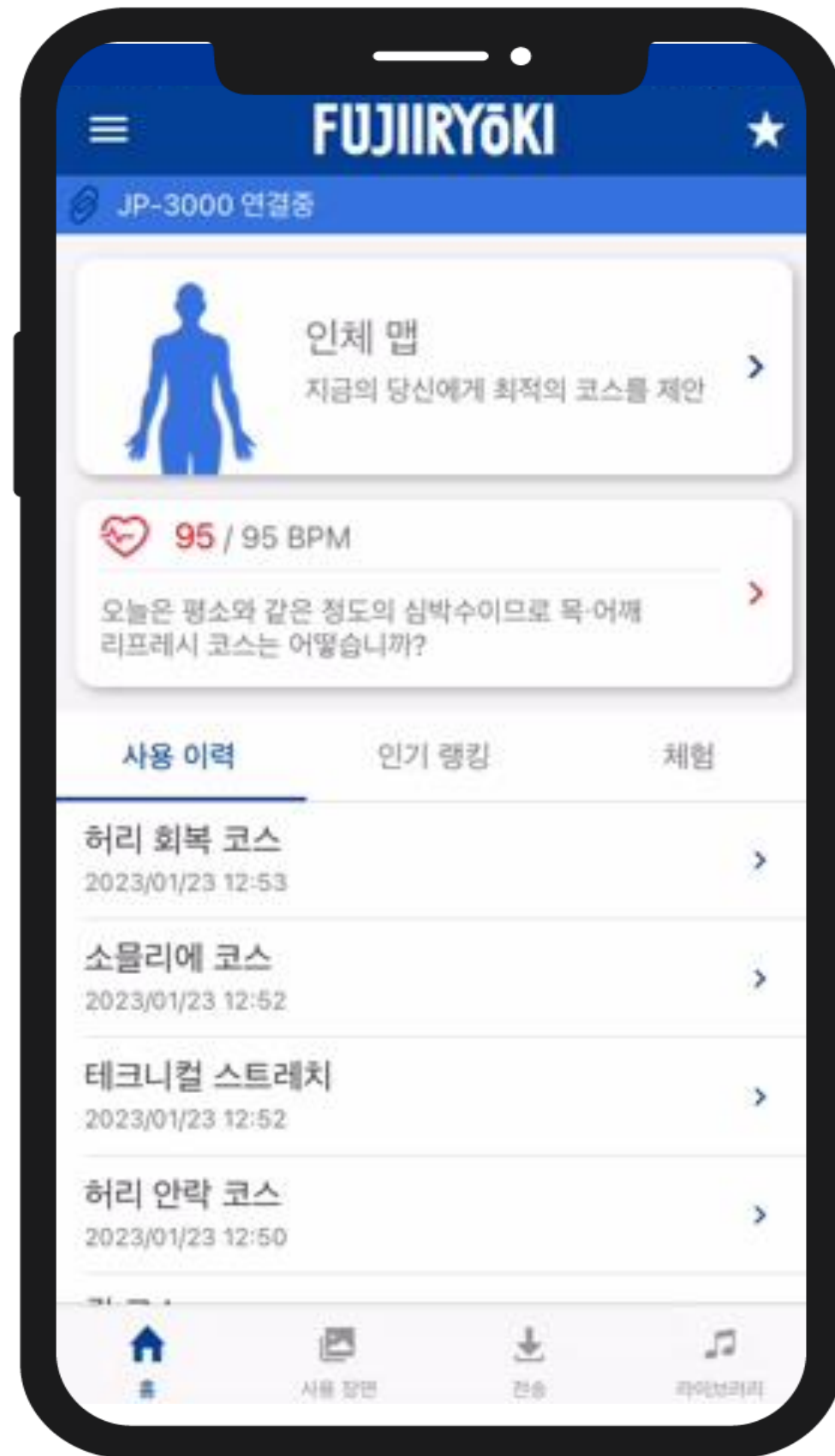

체형 정보 최적화

안마의자 사용 이력으로부터 사용자가 선호하는 마사지의 세기를 분석합니다.
분석 결과를 바탕으로 마사지 실행시에 강도를 자동으로 설정합니다.

- ①홈 화면 왼쪽 상단의 메뉴에서「체형 정보」를 누릅니다.
- ②현재 척추 라인과 취향에 맞게 최적화된 척추 라인이 표시됩니다.
- ③최적화를 원하실 경우 「취향 분석 후 최적화」를 탭하면 체형 정보가 최적화됩니다.

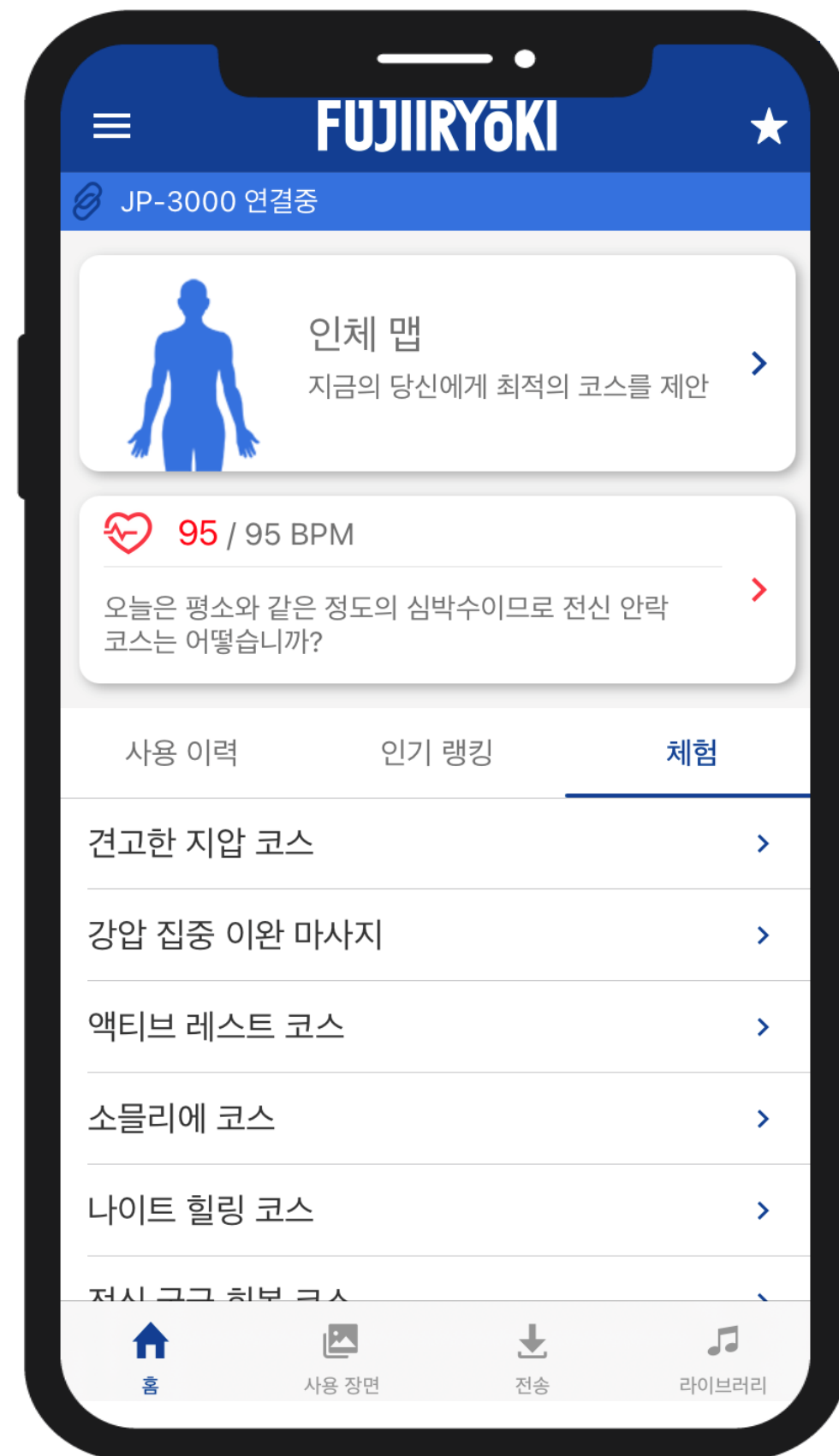


인기 랭킹

서버에서 인기있는 마사지 코스를 집계하여 순위 형식으로 표시합니다. 집계는 매일 업데이트됩니다.

체험

이용하는 안마의자의 사용 이력에서 선택 횟수가 적은 순서대로 마사지 코스를 표시합니다.

평소에 사용하는 마사지 코스와는 다른 코스를 시험해보고 싶을 때 편리합니다.

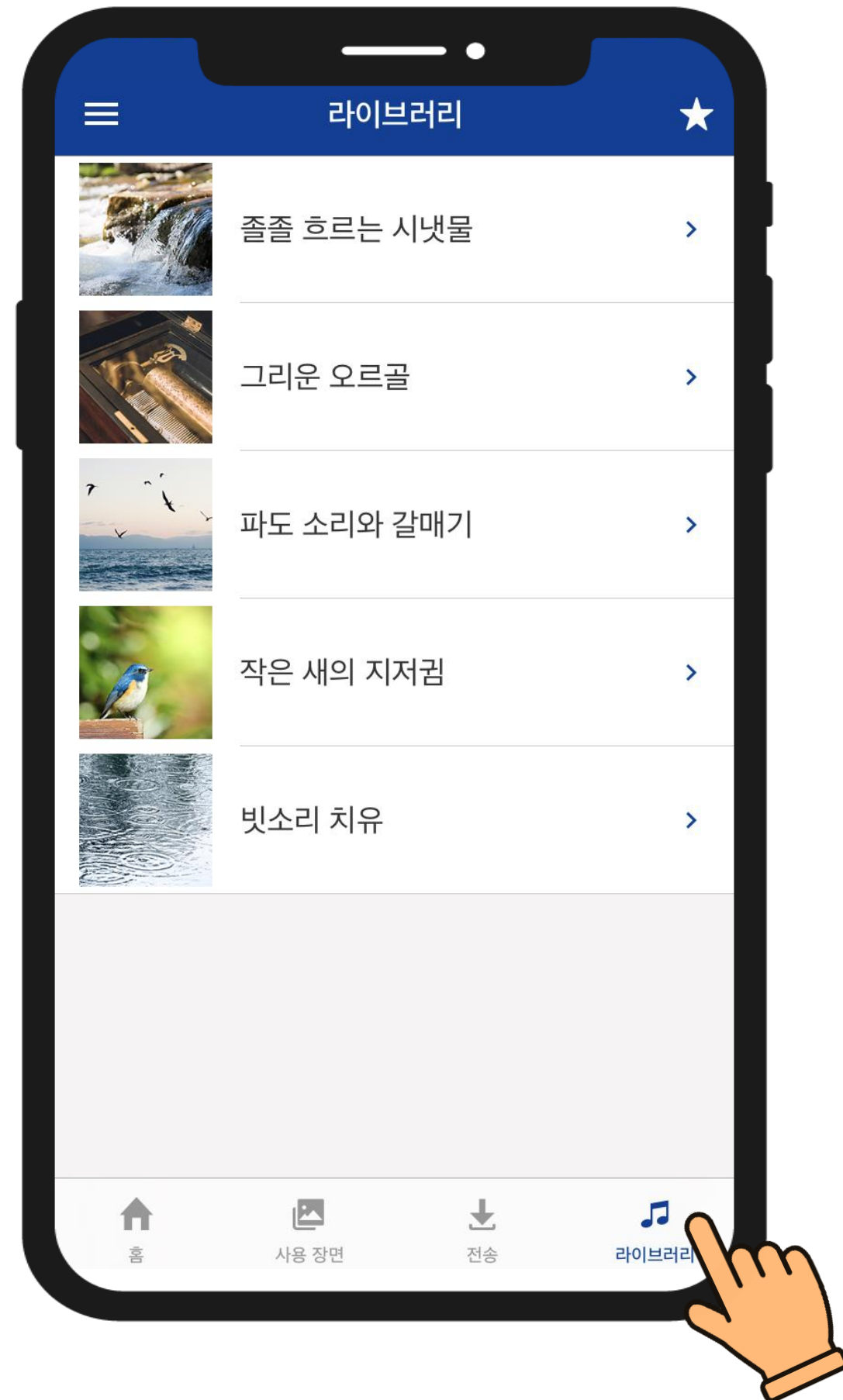

라이브러리

힐링 음악을 다운로드하고 안마의자에서 재생합니다. 몸을 감싸는 듯한 치유의 음악이 릴렉스감 넘치는 마사지 체험을 연출합니다.

APP를 통해 당신의 전용마사지를 즐겨보세요!

